

## Allegato 6 : DPI

### Mascherina Chirurgica (DM)

Norma di Riferimento: EN 14683



BFE – Bacterial filtration efficiency	Type I	Type II	Type IIR
<b>Mascherina Chirurgica (DM)</b>			
<b>Verso il paziente</b>	<b>≥ 95%</b>	<b>≥ 98%</b>	<b>≥ 98%</b>

- Il BFE indica l'efficienza di filtrazione batterica;
- Non è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI);
- È un Presidio Medico – Chirurgico o Dispositivo Medico;
- Impedisce che le particelle biologiche espulse dall'indossatore finiscano nell'ambiente.
- Non garantisce, durante l'inspirazione, la protezione dell'utilizzatore;
- Non sono necessariamente progettate per fare una perfetta tenuta sul volto, e quindi è probabile il passaggio di aria intorno ai bordi
- La R indica resistenza agli spruzzi.

### ATTENZIONE!

La scelta di un Dispositivo di Protezione Individuale e/o di una Maschera chirurgica è strettamente legata al contesto in cui ci troviamo. Scegliere l'idoneo dispositivo significa contestualizzare. In tali circostanze si consiglia inoltre di consultare un esperto per ulteriori chiarimenti. Bisogna considerare soprattutto: le tecniche di vestizione/svestizione, il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale nonché la loro manutenzione, disinfezione e il loro successivo smaltimento.


# Allegato 6 : DPI

## DISPOSITIVI-DI-PROTEZIONE-INDIVIDUALE

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>
Lavare accuratamente le mani.	Appoggiare sul palmo della mano la mascherina e far passare i laccetti sul dorso della mano (tenere il nasello rivolto verso l'alto)	Portare la mascherina sul volto, la base sul mento e il nasello sopra il naso, in modo da coprirlo.	Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico superiore e farlo passare dietro la testa sopra le orecchie.
 <p>5</p>	 <p>6</p>	 <p>7</p>	 <p>8</p>
Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico inferiore e farlo passare dietro la testa sotto le orecchie nella parte superiore del collo.	Con entrambe le mani, aggiustare il nasello affinché aderisca perfettamente al naso.	Provare ad inspirare e verificare che la mascherina aderisca perfettamente (l'aria dovrebbe entrare solo attraverso il filtro).	Eventualmente con uno specchio, verificare che la mascherina aderisca perfettamente su tutto il volto.

		
La parte azzurra/verde è l'esterno e gli elastici devono essere posizionati dietro le orecchie	Il ferretto è esterno nella parte superiore e deve essere adattato al proprio naso	E' necessario estenderla per coprire correttamente naso e bocca completamente

## COME INDOSSARE CORRETTAMENTE I GUANTI

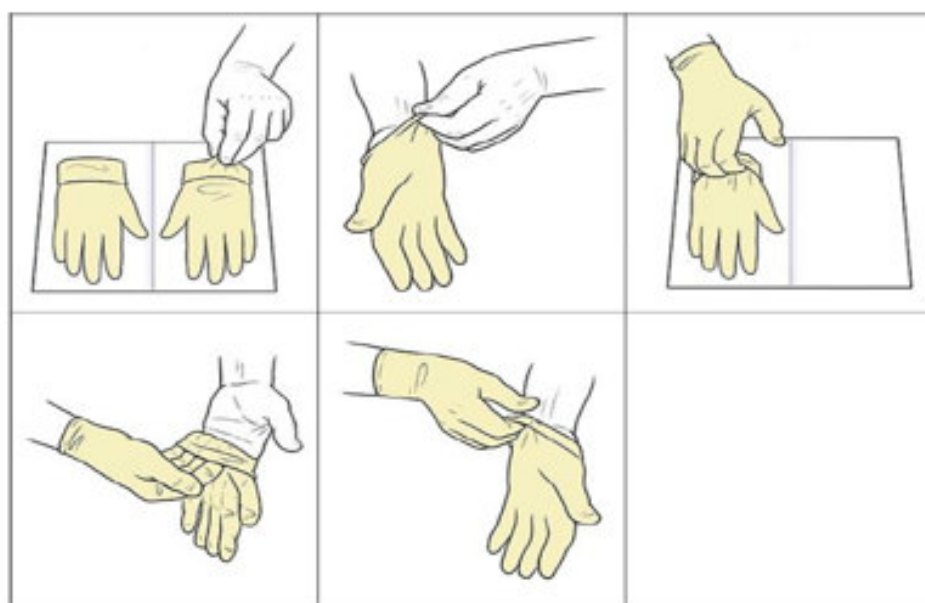

# Allegato 6 : DPI

## COME RIMUOVERE IN SICUREZZA I GUANTI



1



1