

Mascherina Chirurgica (DM)

Norma di Riferimento: EN 14683



BFE – Bacterial filtration efficiency	Type I	Type II	Type IIR
Mascherina Chirurgica (DM)			
Verso il paziente	≥ 95%	≥ 98%	≥ 98%

- Il BFE indica l'efficienza di filtrazione batterica;
- Non è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI);
- È un Presidio Medico – Chirurgico o Dispositivo Medico;
- Impedisce che le particelle biologiche espulse dall'indossatore finiscano nell'ambiente.
- Non garantisce, durante l'inspirazione, la protezione dell'utilizzatore;
- Non sono necessariamente progettate per fare una perfetta tenuta sul volto, e quindi è probabile il passaggio di aria intorno ai bordi
- La R indica resistenza agli spruzzi.

ATTENZIONE!


La scelta di un Dispositivo di Protezione Individuale e/o di una Maschera chirurgica è strettamente legata al contesto in cui ci troviamo. Scegliere l'idoneo dispositivo significa contestualizzare. In tali circostanze si consiglia inoltre di consultare un esperto per ulteriori chiarimenti. Bisogna considerare soprattutto: le tecniche di vestizione/svestizione, il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale nonché la loro manutenzione, disinfezione e il loro successivo smaltimento.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>
<p>Lavare accuratamente le mani.</p>	<p>Appoggiare sul palmo della mano la mascherina e far passare i laccetti sul dorso della mano (tenere il nasello rivolto verso l'alto).</p>	<p>Portare la mascherina sul volto, la base sul mento e il nasello sopra il naso, in modo da coprirlo.</p>	<p>Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico superiore e farlo passare dietro la testa sopra le orecchie.</p>
 <p>5</p>	 <p>6</p>	 <p>7</p>	 <p>8</p>
<p>Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico inferiore e farlo passare dietro la testa sotto le orecchie nella parte superiore del collo.</p>	<p>Con entrambe le mani, aggiustare il nasello affinché aderisca perfettamente al naso.</p>	<p>Provare ad inspirare e verificare che la mascherina aderisca perfettamente. L'aria dovrebbe entrare solo attraverso il filtro.</p>	<p>Eventualmente con uno specchio, verificare che la mascherina aderisca perfettamente su tutto il volto.</p>

				
<p>La parte azzurra/verde è l'esterno e gli elastici devono essere posizionati dietro le orecchie</p>	<p>Il ferretto è esterno e deve essere adattato al proprio naso</p>	<p>E' necessario estenderla per coprire correttamente naso e bocca completamente</p>		

COME INDOSSARE CORRETTAMENTE I GUANTI

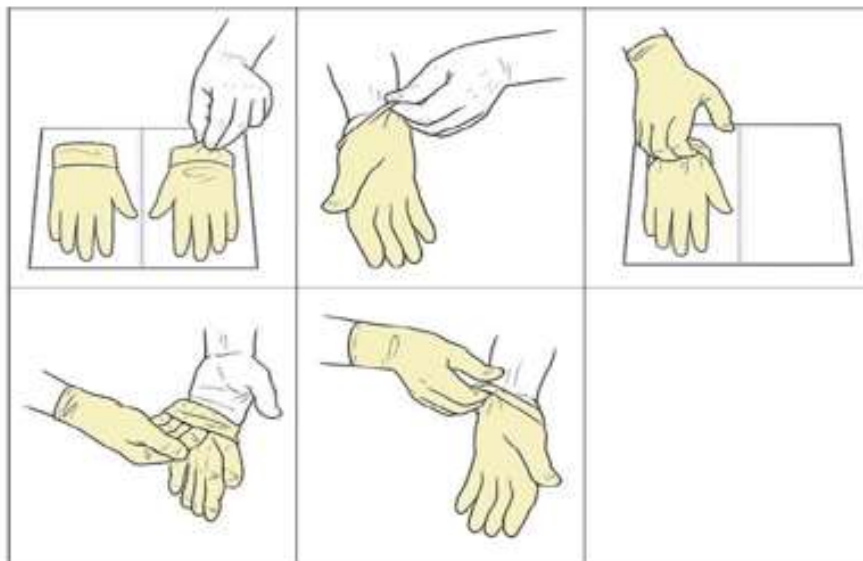

COME RIMUOVERE IN SICUREZZA I GUANTI



1



1